

SOFARGEN® Repair

Żel na skórę

do stosowania miejscowego

Opatrunek na bazie żelu
z kwasem hialuronowym
i sulfadiazyną srebra



Opis produktu:

SOFARGEN® Repair jest opatrunkiem na bazie wody do użytku zewnętrznego zawierającym kwas hialuronowy i sulfadiazynę srebra.

Kwas hialuronowy, dzięki swoim szczególnym właściwościom wiązania wody, w przypadku uszkodzenia skóry pomaga przywrócić i utrzymać biologiczne właściwości skóry takie jak elastyczność i nawilżenie.

Dzięki dużej zawartości wody (powyżej 95%), żel zapewnia właściwe nawilżenie rany co sprzyja procesowi odbudowy tkanek i oczyszczeniu rany ze zmian martwicznych.

Obecność sulfadiazyny srebra metaloorganicznego związku azotanu srebra zawierającego srebro jonowe i sulfonamid działa bakteriobójczo i zapobiega zakażeniom bakteriami egzogennymi.

Wyjątkowy skład produktu **SOFARGEN® Repair** tworzy środowisko, które ułatwia naturalny proces gojenia i zapewnia skuteczną barierę chroniącą uszkodzoną skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Produkt pozostaje w miejscu aplikacji i nie ulega przemieszczeniu podczas rozciągania się krawędzi rany. Można go łatwo usunąć przemywając ranę roztworem soli fizjologicznej.

Skład:

Oczyszczona woda, glicerol, karbopol 974P, wodorotlenek sodu, mikronizowana sulfadiazyna srebra i hialuronian sodu.

Wskazania:

SOFARGEN® Repair jest wskazany do miejscowego leczenia zmian skórnych, takich jak: otarcia, zranienia, skaleczenia, rany, oparzenia, zmiany chorobowe, podrażnienia skóry i inne schorzenia dermatologiczne. Może być stosowany pomocniczo w gojeniu rany, chroniąc ją przed ryzykiem infekcji. Obecność żelu ułatwia również oczyszczanie rany ze zmian martwicznych (skrzepów i strupów).

Dawkowanie i sposób użycia:

Po dokładnym oczyszczeniu rany nanieść równomierną warstwę żelu **SOFARGEN® Repair** o grubości 2 do 3 mm na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry (na ranę). **SOFARGEN® Repair** żel można stosować bezpośrednio na ranę lub można go wcześniej rozprowadzić na jałowej gazie i następnie nałożyć na ranę w celu uzyskania większego nawilżenia rany. W takim przypadku można go pozostawić w miejscu aplikacji od 24 do 72 godzin. Można stosować na opatrunki poliuretanowe oraz pół okluzyjne jako środki oczyszczające. Żel **SOFARGEN® Repair** jest również doskonałym zamiennikiem dla innych często stosowanych hydrożeli.

Żel **SOFARGEN® Repair** należy stosować w sposób ciągły i nieprzerwanie, raz lub dwa razy dziennie aż do całkowitego wyleczenia, w szczególności ran, które mogą łatwo ulec zakażeniu podczas samoistnego

gojenia oraz po zabiegach chirurgicznych. Każdorazowo przed ponownym nałożeniem żelu należy dokładnie oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej lub wodą.

Środki ostrożności:

Pacjenci ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu **SOFARGEN®Repair** nie powinni go stosować. Nie zaleca się używania dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku niepełnego wyleczenia lub pojawienia się objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. W razie przypadkowego połknięcia zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia:

Z powodu zawartości jonów srebra żel może przebarwiać się na brązowo pod wpływem światła. Zjawisko to nie ma wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo produktu. Nie stosować jednocześnie z innymi płynnymi lub stałymi środkami dezynfekującymi. Po każdym użyciu należy zakręcić tubkę. U kobiet w ciąży oraz u małych dzieci stosować tylko po zasięgnięciu porady medycznej. **SOFARGEN®Repair** należy stosować do leczenia tylko niewielkich ran. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania do oczu. Nie należy połykać produktu.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić przejściowe uczucia pieczenia lub podrażnienie, jednak nie powodują one żadnych następstw, oraz rzadkie miejscowe reakcje uczuleniowe. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Termin Ważności i Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie używać produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Data ważności dotyczy nie otwartego i prawidłowo przechowywanego produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania do oczu. Produkt należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa 25 g.

Data ostatniej aktualizacji: Grudzień 2024.



Zobacz
instrukcję
dotyczącą
użytkowania



Nie wystawiać
na działanie
temperatury
powyżej 30°C



Zużyć
przed



Nr serii



0373



Producent:
SOFAR S.p.A.
Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) - Italy

Dystrybutor w Polsce:
AVEC Pharma Sp. z o.o.
ul. Beżowa 2, 54-046 Wrocław
www.avecpharma.com

ALFASIGMA

03100318-45004143